

Treść oznakowania opakowania zewnętrznego

Acerin  
plastry na odciski

z kwasem salicylowym

Wspomagają leczenie nagniotków (odcisków).  
Działają wygładzająco.  
Zmniejszają ucisk.  
Przynoszą ulgę.


6 sztuk

Plastry na odciski z centralnym dyskiem wykonanym z pianki polietylenowej. Działają wygładzająco i ochronnie. Zmiękczejają skórę, dzięki czemu zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka. Dodatkowo piankowy dysk zabezpiecza odcisk przed tarcieniem i uciskiem.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczony obszar, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie i działanie plastra. Zdjąć zabezpieczenie ochronne i umieścić plaster tak, aby odcisk znalazł się centralnie pod nim. Codziennie zmieniać plaster na nowy.

**Tylko do użytku zewnętrznego.**

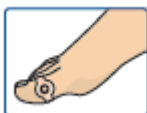

Kleje topliwe z siatką UV-C, opracowane w najnowocześniejszej technologii.  
Nie zawiera rozpuszczalników. Optymalne działanie w każdych warunkach środowiskowych.

Testowane dermatologicznie. Hipoalergiczne. Nie zawiera PCV.

**OSTRZEŻENIA:** Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować w przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie. Pacjenci z cukrzycą i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci do 16 roku życia przed zastosowaniem plastrów powinni skonsultować się z lekarzem. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera 35-40% kwasu salicylowego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy powiadomić wytwórcę i właściwe władze.

Wymiary: 72 x 19 mm

[ilustracja produktu]

Osobno pakowane.



Data wydania instrukcji używania: 04.2021

CE  
0051



Wyrób medyczny



AS004341



Dystrybutor:

(logo)

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

[www.acerin.pl](http://www.acerin.pl)



Wytwórca:

Eurosirel S.p.A.

Viale Europa, 30

20047 – Cusago (MI)

Italy